





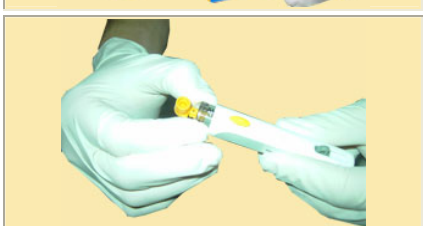






## Fiche d'utilisation du Lactate Pro

1	Étalonner le Lactate Pro, grâce à la petite languette fournie. Ce réactif a la particularité de posséder une petite bulle verte sur la face supérieure.	
2	Préparation du réactif à utiliser pour le test. Chaque réactif est à usage unique.	
3	Insérer la lamelle dans le boîtier d'analyse Lactate Pro	
4	Mettre de l'alcool modifier sur une compresse afin de nettoyer au préalable la zone à piquer	
5	Nettoyer la zone à piquer	
6	Préparer une aiguille à mettre dans le stylo piqueur	
7	Régler la profondeur à laquelle le stylo va propulser l'aiguille. Le réglage va de 1 à 5.	

8	Piquer à l'aide du stylo le doigt ou l'oreille. Ceci n'est pas douloureux.	
9	Nettoyer la première effusion de sang, qui ne donne pas de bonne valeur.	
10	Avancer la goutte de sang près de l'extrémité du réactif. Celle-ci va pénétrer par capillarité jusqu'à la zone de mesure.	
11	Après l'entrée de la goutte le Lactate Pro décompte 60 secondes avant d'afficher le résultat.	
12	<p style="text-align: center;"><b>Important!</b></p> <p>Placer les déchets d'aiguille dans une contenant solide afin d'éviter toutes piqûres avec d'autres personnes et des problèmes de contamination. (une bouteille en plastique dur remplit parfaitement cette fonction). Vous pouvez ensuite restituer l'ensemble dans une pharmacie qui saura éliminer le tout.</p>	